



Anleitung Anpassungs-Set

Dr. Arabin GmbH & Co KG
Alfred-Herrhausen-Str. 44, D-58455 Witten
Tel: +49 2302 189214 www.dr-arabin.de info@dr-arabin.de




Bestandteile und Lagerung: Das Anpassungs-Sets besteht aus jeweils 3 x 4 dünnen Ringen aus sehr weichem gewebefreundlichem Silikon. Die Ringe sind im Vergleich zu unseren therapeutischen Ring Pessaren viel leichter zu komprimieren und grün, um sie von den blauen therapeutischen Pessaren zu unterscheiden. Das Set kann bei Raumtemperatur bei 1 bis 30°C geschützt vor UV-Strahlung ohne direkten Kontakt zu reaktiven Medien wie Gas, Ozon oder Mineralöl gelagert werden.

Indikation: Das Anpassungs-Set dient dem Anpassen der richtigen Größe von runden Pessaren (normale und dicke Ringpessare, Hodge-, Schalen-, Siebschalen, Urethra- bzw. Urethraschalen) und indirekt auch von Würfel- Pessaren.

Größen: Folgende 4 Ring-Größen sind in insgesamt 3 Sets zusammengefügt:

Klein: 45 / 50 / 55 / 60 mm
Mittel 65 / 70 / 75 / 80 mm
Groß: 85 / 90 / 95 / 100 mm

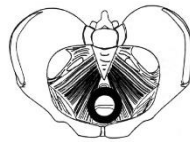

Gebrauch: Der zusammengedrückte Ring wird ins hintere Scheidengewölbe eingelegt und dann nach vorn geschoben. Der Arzt testet durch Belastung wie Husten, Pressen und Bewegung, welche Größe passend ist. Es sollte das Pessar mit dem kleinsten Umfang eingelegt werden, das gerade hält. Nach dem Test sollte der Sitz noch einmal kontrolliert und das Pessar nach der Anpassung wieder entfernt werden

Nebenwirkungen/ Komplikationen: Bei der kurzen Anpassung in einer ambulanten Einrichtung sind bisher keine Nebenwirkungen beschrieben.

Liegedauer: Da die Ringe des Sets nur in einer ambulanten Einrichtung verwendet werden dürfen ist die Liegedauer < 1 Stunde.

Kontraindikationen: Eine Allergie gegen Silikon ist extrem selten, wäre aber eine Kontraindikation. Ringe des Anpassungs-Sets sind nicht für die Therapie vorgesehen.

Säubern: Das Säubern des Pessars sollte unter fließendem lauwarmem Wasser ohne Verwendung von Desinfektionsmitteln erfolgen. Danach darf das Produkt physikalisch gereinigt und sterilisiert werden. **Unsere Firma verfügt hierzu über eine Evaluation, die über unsere web site www.dr-arabin.de abgerufen werden kann.** Bei Beschädigung jeglicher Art ist das Produkt nicht mehr zu verwenden.

Hinweis: Schwere Komplikationen sollten dem Hersteller und ggf. den verantwortlichen Behörden gemeldet werden.

Entsorgung: Zur Entsorgung in medizinischen Einrichtungen müssen die länderspezifischen Vorschriften eingehalten werden.

Für die Anpassung von Würfel-Pessaren gilt folgende Umrechnungstabelle:

Ring Pessar	Würfel Pessar
45-50 mm	Größe 0 – 25 mm
55 – 60 mm	Größe 1 – 29 mm
60 – 70 mm	Größe 2 – 32 mm
70 – 75 mm	Größe 3 – 37 mm
80 – 85 mm	Größe 4 – 41 mm
ab 90 mm	Größe 5 – 45 mm